

24 MAY 2013

24 MAY 2013



Donna Glove

Kendi Kendine Meme Muayenesi Eldiveni
Meme kanserinin gelişmesini önleyebilmektedir

Donna Glove Nedir?

Donna Glove memedeki kitlelerin tespit edilmesi için tasarlanmış bir tıbbi cihazdır. Her kadına kendi kendine muayene yapmak için etkili bir yöntem sağlamak üzere MDA Donna Glove'un dağıtımını yapmaktadır.

Donna Glove bloke etme ve büyütme ilkesine göre çalışır. Hassasiyeti artırır ve muayene esnasında memelerin hareketinin neden olduğu sürtünmeyi azaltır. Donna Glove, toz şeker tanesi büyüklüğündeki kitleleri tespit edebilmektedir, bu kitleler çiplak elle tespit edilemezler.

Bu ürünün etkinliği Roma'daki Sapienza Üniversitesinden Dr. Verardi ve Dr. Buonomo tarafından test edilmiştir.

Donna Glove dünya çapında patentlidir.

Donna Glove Nasıl kullanılır?

Kendi kendine meme muayenesi 5 basit adımda gerçekleştirilebilmektedir:



Tercihen oturur ya da ayakta durur vaziyette yapılmalıdır:

1. Bir elinize Donna Glove'u geçirin.
2. Diğer kolunuzu başınızın üzerine kaldırın.
3. Avuç içiniz Donna Glove'un içinde olacak şekilde elinizi sabit tutun.
4. Ortadaki 3 parmağınızın uçlarını kullanın ve ileri ve geri hareket ettirin. Bu hareketi yavaşça tekrar edin ve her seferinde yaklaşık 5 cm'lik bir alanı kontrol edin.
5. Aynı bölgeyi saat yönünde ve aksi yönde dairesel hareketlerle muayene etmeye devam edin.
6. Bu işlemi memelerin tamamını ve koltuk altlarını kontrol etmek için tekrar edin.

Memelerinizi hissedin.

Bir elinize eldiveni geçirin, muayeneyi oturarak ya da omuzun altında bir yastık olacak şekilde sırtüstü yatarak yapın. Her pozisyonda diğer elinizi başınızın üstünde tutun.

İşbu talimatı, ibraz edilen asline uygun olarak İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edilmiştir.
Dilek Güner

Neden Donna Glove Kullanmalıyım?

Meme kanserinin erken teşhisi başarılı bir tedavinin kilit noktasıdır.

Bu tip bir tümör kısa sürede gelişebilmektedir bu yüzden her 2 yılda bir mamografi çekilmelisiniz ve bu da Donna Glove ile düzenli olarak yapılacak bir kendi kendine muayenenin yerini tutmaz.

Donna Glove'in hiçbir yan etkisi ve radyasyon riski bulunmamaktadır.

Her 9 kadından 1'inin yaşamı süresince meme kanserine yakalanmakta olduğu tahmin edilmektedir. Sadece İspanya'da 16 binden fazla kadına her yıl meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Erken teşhis bu durumların çoğunun invaziv tümörlerle sonuçlandığı ve beraberinde metastaz riski getirdiği gerçeğini önleyebilmektedir.

Donna Glove'u kimler kullanabilir?

25 yaşın üzerindeki her kadın. Meme kanseri 25 ve 30 yaş arası kadınlarda çok da beklenmedik değildir.

TEKNİK BİLGİLER:

Sadece hariçten kullanılmı için, şeffaf, tatsız ve herhangi bir venom içermeyen polüüretan membran; insan vücudu için zararsızdır.

Uygun sıcaklık: -20° ve 120°C arası

Kullanım ömrü: en az 2 yıldır

Yıkama talimatları: sadece kaynatılmış ve sonrasında uygun bir sıcaklığa gelecek şekilde soğutmuş su ile yıkayın.

Güç basıncı veya dayanıklılık: 80 KG

Eldivenin içersinde bulunan sıvı CE yönetmelikleri (Avrupa Uygunluğu) ve FDA şartlarına uygun hafif bir mineral yağ olan NF-18'dir.

REFERANSLAR:

1. DONNA GLOVE'un etkinliğini ispatlamak için klinik deney yapılmıştır.

